


Es importante un buen ajuste de la mascarilla ¡Siga las instrucciones!




1

La cara debe encontrarse limpia, seca y libre de vello.

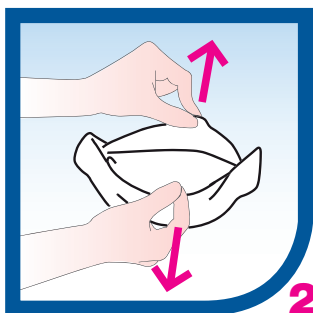


2

Desplegar los paneles superior e inferior y moldear el clip nasal para dar forma a la mascarilla.

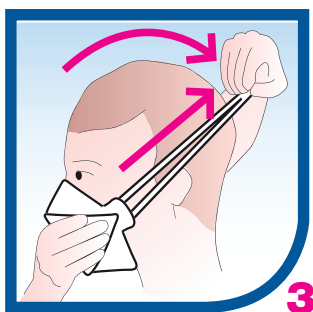


3

Sujetando la mascarilla con una mano y las bandas de ajuste con la otra, colocarla sobre la nariz y la boca. Pasar las bandas de ajuste hasta la coronilla.

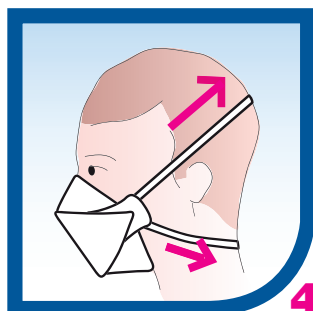

4

Dejar la banda elástica superior a la altura de la coronilla y la inferior en la nuca.

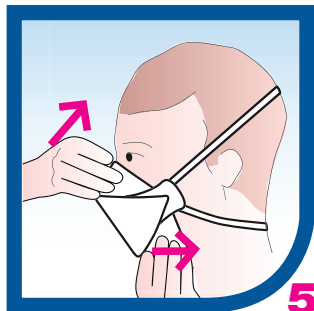

5

Desplegar el panel superior por encima de la nariz y el inferior por debajo de la barbilla buscando el máximo ajuste a la cara.



6

Adaptar el clip nasal presionando con ambas manos para que se adapte a la forma de nariz y cara.



7

PRUEBA DE AJUSTE

Cubra la mascarilla con ambas manos e inhale profundamente. Si nota alguna entrada de aire por los bordes reajuste de nuevo.

El clip nasal debe estar bien adaptado a la forma de la nariz (recuerde utilizar las 2 manos)

La mascarilla debe estar bien colocada sobre la nariz, la cara y la barbilla

Asegúrese de que todos los paneles están perfectamente acoplados a su cara

La banda superior debe quedar situada sobre la coronilla y no debe estar retorcida

La banda inferior debe quedar en la nuca y no debe estar retorcida

Más información en: www.3M.com/es/colocacionmascarilla

Para cualquier consulta, diríjase a:

Departamento de Productos de Protección Personal de 3M e-mail: ohes.es@3M.com

©3M 2009. Todos los derechos reservados

3M